



Assemblage instructie gelaatsscherm/face shield

Assemblage instructie gelaatsscherm/face shield

1. Zorg dat je handen goed gewassen zijn.
2. Pak het frame en een transparant vel, dit vel moet aan 1 kant geperforeerd worden met een standaard 4 gats-perforator op stand 888 als dat nog niet zo zou zijn.

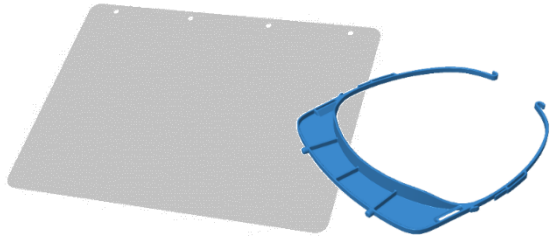

3. Bevestig nu het transparante vel aan het frame; begin aan 1 kant, doe het pinnetje van het frame door het buitenste gaatje van het vel en zorg dat het uiteinde van het transparante vel NIET onder het flapje zit.

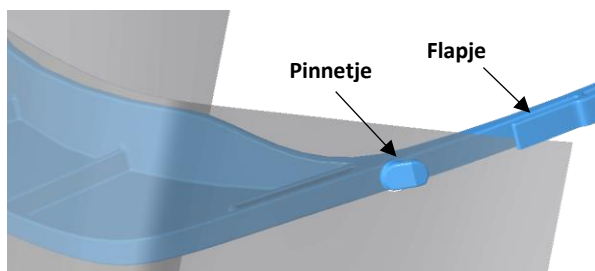


4. Bevestig nu het transparante vel aan de andere kant aan het pinnetje. Houd het sheet daarbij een beetje schuin, zoals op het plaatje hieronder.



5. Draai nu het transparante vel in de richting van de pijl voorzichtig op zijn plaats, zodat de pinnetjes aan de voorkant in de gaatjes vallen.

6. Steek het uiteinde van het vel onder het flapje.
7. Je bent nu klaar met in elkaar zetten.

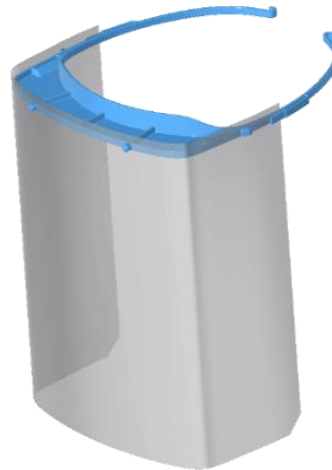

8. Soms zit het gelaatsscherm niet strak genoeg. Je kunt dan een elastiekje doen om het uiteinde van de pootjes.
9. Het is belangrijk om het frame en het transparante vel regelmatig te reinigen. De schoonmaak instructie kun je op de vorige pagina vinden.
10. Het loshalen van de sheet gaat op precies te tegenovergestelde manier als het assembleren.

Aanpassingen zelf doen

We hebben feedback gekregen, dat sommige mensen het vervelend vinden dat de haakjes steeds in het haar blijft steken. Blijft het gelaatsscherm goed zitten en je gebruikt geen elastiekje, dan kun je met een kniptangetje ook de haakjes afknippen.

Sommige mensen vinden de pootjes knellen tegen hun hoofd. De pootjes kun je 'stellen' door de uiteinden van de pootjes even in heet water (moet net van de kook af zijn) te doen. Hierdoor wordt de kunststof zacht en als je het uit het water haalt, moet de pootjes in de juiste vorm houden tijdens het afkoelen. Dit kun je eventueel opnieuw doen totdat de juiste pasvorm bereikt is. Eigenlijk net zoals de opticien je bril stelt.

Tevens is voor sommige mensen het transparante vel te lang, maar je kunt dit zelf makkelijk met een schaar inkorten.

Assemblage- en schoonmaakinstructie beschermmiddelen

Bandje voor over het hoofd

Mocht het gelaatsscherm toch nog afzakken, ondanks het elastiekje aan het uiteinde van de pootjes, dan is er een sleufje voorzien aan beide zijanten. Hier kun je een lint of elastiek aanvast knopen, zodat je extra band over je hoofd hebt. Zie hiervoor de afbeeldingen hieronder.



Schoonmaakinstructie

Al onze producten zijn **HERBRUIKBAAR!!!**

Voor alle producten geldt, dat je de onderdelen kunt schoonmaken door:

- ze in een sopje te doen. Om het sopje te maken kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld allesreiniger of afwasmiddel. **LET OP:** Gebruik hiervoor lauwwarm of koud water. De 3D-geprinte onderdelen kunnen vervormen bij gebruik van te warm water.
- of ze schoon te maken met alcohol of met chloor.