

Face-Shield

..... x Open x Gesloten	Aanvraagnr:
--------------	------------------	-------------

Zakje bijna leeg? Vraag nieuwe aan op www.makers4all.org

Veel plezier met uw beschermingsmiddelen!

Vertelt u ons hoe ze u bevallen?

Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback uit de praktijk!

Op onze website vindt u (onderaan de 'VRAGERS'-pagina) een link naar het Feedback-formulier.

De getalenteerde ontwerpers in onze MAKERS4ALL Community gaan graag met uw op- en aanmerkingen aan de slag. Omdat we 3D-printen, kunnen we eventuele aanpassingen snel doorvoeren.

Helpt u ons helpen?

Wij kunnen dit doen door de donaties die we van u krijgen. De vrijwilligers van Stichting MAKERS4ALL staan met hun 3D-printers klaar om zorg/hulpverleners en mensen met een contactberoep of in een risicogroep, kosteloos te helpen aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

U kunt onze makers ondersteunen in de kosten, dus doneer nu! Doneren (ook van materialen) kan onze website of door een bedrag over te maken naar: **NL30 TRIO 0254 320694 t.n.v. HWF met vermelding 'makers4all'**.

Schoonmaken

Al onze producten zijn **HERBRUIKBAAR!!!**

Voor al onze items geldt, dat u de onderdelen kunt schoonmaken:

- ★ Wassen in een lauwwarm of koud sopje van bijvoorbeeld afwasmiddel of allesreiniger.

LET OP: Heet/te warm water kan de 3D-geprinte onderdelen doen vervormen!!

- ★ Of reinigen met alcohol.

(de items zijn ook bestand tegen chloor)



Zijn de sheets aan vervanging toe?


Als de sheets slijten/bekrast raken, kunt u deze gemakkelijk vervangen door transparante schutbladen, te koop bij o.a. de kantoorboekhandel. Een dikte van 150 a 180 micron is het fijnst. Schutbladen van PET zijn meestal helderder (fijner) dan PVC. Perforeer ze met een standaard 4-gats perforator of 2x met een 2-gats perforator op stand 8:8:8. Knip de onderste hoeken rond.

Hoe zet u het Face-Shield in elkaar?

1. Was uw handen.
2. Pak het frame en de sheet (Check of de sheet geperforeerd is en doe dit zo nodig alsnog):



3. Bevestig de sheet aan het frame: begin aan 1 kant en doe het pinnetje van het frame door het buitenste gaatje van de sheet. Zorg dat het uiteinde van de sheet (nog) NIET onder het flapje zit.

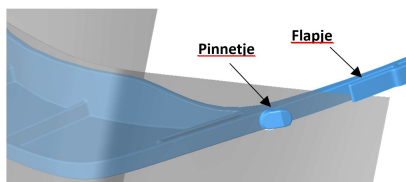

4. Bevestig de sheet aan de andere kant ook aan het pinnetje.

Houd de sheet wat schuin, zoals op het plaatje:



5. Draai nu de sheet in de richting van de pijl voorzichtig op z'n plaats, zodat de pinnetjes aan de voorkant in de gaatjes vallen.
6. Steek de uiteinden van de sheet aan weerskanten onder het flapje.
7. Indien gewenst kunnen de uiteinden van het frame tijdens het dragen, met een elastiekje bijeen worden gehouden.

Eigen Aanpassingen:

* Als de uiteinden van het frame te veel in uw hoofd drukken, kunt u ze verwarmen (met föhn of heet water) en in de gewenste stand buigen.

* Als het Face-Shield goed blijft zitten zonder gebruik van een elastiekje, kunt u de krullende uiteinden met een tang afknippen, als ze u hinderen.

* Mocht het Face-Shield (zelfs met elastiekje achterlangs) nog afzakken, dan kunt u m.b.v. de sleuven in de pootjes een lint/elastiek over het hoofd bevestigen.



* Als de sheet te lang is, kunt u deze bijknippen met een schaar. Let wel op dat u voldoende beschermd blijft!